

## INSTRUCTIVO DE LAVADO PARA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

El procedimiento de limpieza consta de los siguientes pasos:

1. Clasificación: separación del material descartable del reutilizable



2. Desarme: el instrumental debe lavarse abierto y desmontado en lo posible.



3. Enjuague inicial: preferentemente con agua fría



4. Limpieza y desinfección: puede ser manual o en maquina.

*Se recomienda emplear detergentes multienzimaticos, descomponen grasas y proteínas para que se disuelvan en agua caliente*



5. Verificación de la limpieza y secado: se verifica el lavado del material y se procede al secado, que puede ser con paños secos o en estufas.



6. Esterilización: por calor húmedo o seco

