



Línea gratuita: 0800.444.7467

GEL TERAPÉUTICO - FRÍO - POST-QUIRÚRGICO **REUTILIZABLE - ANATÓMICO - FLEXIBLE**

Éste nuevo Gel terapéutico es ideal para tratamientos odontológicos, traumatológicos, y maxilo-faciales, en los que se indica la aplicación de una compresa fría, con el propósito de disminuir las posibilidades de inflamación como por ejemplo las referidas a la instancia post-operatoria quirúrgica.

Ventajas:

- »Mantiene la temperatura en valores más bajos por tiempos más prolongados, sin perder la flexibilidad cuando es enfriado por debajo de cero grados centígrados.
- »Esta flexibilidad le permite adaptarse mejor a la anatomía de la zona tratada, optimizando así la llegada del frío a las zonas que lo requieren.
- »Su aplicación en el consultorio inmediatamente después de la maniobra operatoria-quirúrgica, facilita la recuperación del paciente haciéndola más confortable al disminuir la respuesta inflamatoria.

Modo de uso:

Para obtener el máximo rendimiento de frío, congelar en freezer el sachet de gel dentro de su funda de friselina. Retirar y aplicar inmediatamente sobre la piel, con la funda de friselina. Si no dispone de un freezer y solo se enfría en el congelador de la heladera, se puede aplicar sin la funda de friselina (solo en este caso).

NO TÓXICO - NO COMESTIBLE - DESCARTAR SI ES PERFORADO.

E y G Medical System S.R.L
Uruburu 1010 - Oficina D - 2° Piso
C1114AAF CABA - Argentina
Tel. 54.11.4822.6006
info@q-implant.com.ar
www.q-implant.com.ar



Aprobado por ANMAT

ANMAT: Disposición 3325/15 - Legajo N° 2196
ANMAT: Certificación BPF Disposición N° 7425/13
Autorizado por el Ministerio de Salud: Disposición 357



GESTION
DE LA CALIDAD

Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 13.485:2016



Antes de imprimir este instructivo, piense detenidamente si realmente necesita una copia en papel. Q-implant, cuidamos el medio ambiente.